

Probenentnahme Parasitologie

Fremdmaterial

Implantat (z.B. Prothesen, Osteosynthesematerial, Herzklappen usw.)
Steriles Gefäss.

Kontaktlinse

Bei Verdacht auf Infektion mit *Acanthamoeba* spp. Kontaktlinsen zusammen mit der Aufbewahrungsflüssigkeit für den mikroskopischen und kulturellen Erregernachweis einsenden.

Hinweis: Die Kontaktlinsen werden bei der Probenaufarbeitung zerstört. Deshalb vor der Einsendung unbedingt das schriftliche Einverständnis der Patienten einholen!

Liquor

Steriles Gefäss.

Mikroskopischer und kultureller Erregernachweis: Mindestmenge: 0.5 ml

Hinweis: Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Unbedingt auf ausreichende Probenmenge achten, wenn Analysen aus verschiedenen Einheiten veranlasst werden (Summe der Mindestmengen). Es gelten folgende Richtgrössen:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| - Allgemeine Bakteriologie (mikroskopischer und kultureller Erregernachweis) | Mindestmenge: 0.5 ml |
| - Mykobakteriologie (mikroskopischer und kultureller Erregernachweis): | Mindestmenge: 1.0 ml |
| - Parasitologie (molekularbiologischer Erregernachweis): | Mindestmenge: 0.5 ml |
| - Virologie (kultureller und/oder molekularbiologischer Erregernachweis): | Mindestmenge: 0.5 ml |
| Antikörpernachweis (Infektserologie): | Mindestmenge: 0.1 ml pro verlangtem Antikörpernachweis |