

## Probenentnahme Allg. Bakteriologie

### Punktat

#### Allgemein

##### Steriles Gefäss

Hinweis: Bei kleinen Probenmengen oder bei speziellem Verdacht auf eine Anaerobier-Infektion empfehlen wir die Verwendung des Spezialmediums für Punktate (Portagerm).

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

##### Knochenmark

Mindestens 0.5 ml Aspirat in ein steriles Röhrchen ohne Zusätze geben.

Hinweis: Vor der Aspiration mit Spitze steril Heparin aufziehen, und Spritze anschliessend wieder VOLLSTÄNDIG entleeren.