

Probenentnahme Mykologie

Punktat

Allgemein

Steriles Gefäss

Hinweis: KEIN Formalin verwenden!

Der Nachweis von *Pneumocystis carinii*, *Cryptococcus* spp. und dimorphen Pilzen (*Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Histoplasma* spp.; Endemiegebiete beachten!) muss auf dem Auftragsformular gezielt verlangt werden.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Knochenmark

Mindestens 0.5 ml Aspirat in ein steriles Röhrchen ohne Zusätze geben.

Hinweis: Vor der Aspiration mit Spitze steril Heparin aufziehen, und Spritze anschliessend wieder VOLLSTÄNDIG entleeren.