

Probenentnahme Parasitologie

Punktat

Allgemein

Steriles Gefäss.

Hinweis: Für den kulturellen Nachweis von *Leishmania* spp. sind spezielle Transportbedingungen erforderlich. Der Dienstarzt Bakteriologie (181-6701) berät Sie gerne.

Der mikroskopische Nachweis von *Echinococcus* spp. erfordert die Einsendung von möglichst viel unfixiertem Zysteninhalt.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Knochenmark

Mindestens 1.0 ml Aspirat in ein EDTA Röhrchen (z.B. Monovette rot) geben.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei Raumtemperatur.

Liquor

Siehe dort.