

Probenentnahme Virologie

Punktat

Allgemein

Steriles Gefäss.

Hinweis: Punktat nicht ins Transportmedium für Chlamydien & Viren geben, weil der resultierende Verdünnungseffekt die Sensitivität der Untersuchung beeinträchtigt und daher unerwünscht ist.
Mindestmenge: 1 ml Probe.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Knochenmark

Mindestens 1.0 ml Aspirat in ein EDTA Röhrchen (z.B. Monovette rot) geben.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei Raumtemperatur.

Liquor

Siehe dort.